



TRANSPORTE DE MUESTRAS

E – 07.01

Fecha Última
Revisión:
17/12/19

Transporte de muestras hacia el laboratorio en vehículos de transporte

- Las cajas provistas por Biolab o en cajas adecuadas del Derivante son transportadas en vehículos (Baúl o lugar de guarda de cargas) dentro de una caja conservadora. Asegurarse que la conservadora no este rota y la tapa cierre correctamente
- Las muestras biológicas se ubican dentro las cajas en gradillas de manera que se mantengan en posición vertical. Los laboratorios Derivantes deben asegurarse que la caja contiene los frio pack necesarios para mantener la cadena de frío

Sr Transportista:

En caso de accidente, derrame o fuga de material biológico, siga las siguientes instrucciones:

- Colocarse guantes o en su defecto bolsas a modo de guantes

- Tomar el paquete (caja) y colocarlo dentro de una bolsa acorde al tamaño del envase y cerrar con firmeza.
- Ubicarla en lugar seguro.
- Decontaminar el área si hubo derrame con alcohol etílico 70% P/V o puro en su defecto.
- Lavarse las manos.
- Llamar inmediatamente a BIOLAB S.R.L. o al laboratorio de derivación, y, como tercera opción al centro sanitario más cercano.